



Curas Ltd.

Curas is een internationaal merk van disposable medische hulpmiddelen en hygiënische producten voor de gezondheidszorg. QRS is exclusief partner van Curas binnen Nederland. Producten die op de markt worden geïntroduceerd voldoen aan alle wet- en regelgeving.

Emptying Bag C3



Het ledigen van een urinezak is een veelvoorkomende en dikwijls frustrerende handeling binnen ziekenhuizen en zorginstellingen. Veelal wordt dit gedaan door het kraantje van de urinezak te openen en de inhoud ervan in een onsteriele bak te laten aflopen. Uit het oogpunt van ergonomie, infectiepreventie en kostenefficiëntie zijn wenselijk en dankzij de C3 nu ook mogelijk.

- Doordat de urine vanuit de kraan een bak inloopt, geeft dit risico op spatten.
- De verpleegkundige zit langere tijd in een niet ergonomische houding (gehurkt) gedurende het ledigen van de urinezak.
- Indien de verpleegkundige wegloopt tijdens het ledigen van de urinezak bestaat de kans dat de kraan van de urinezak langer open blijft staan dan gewenst is.
- Er bestaat een risico op morsen van de urine tijdens transport naar de spoelruimte.
- De onsteriele bak dient na gebruik gereinigd en gedesinfecteerd worden. Dit brengt hoge kosten met zich mee.
- Specifieke aandacht is nodig bij het ledigen van urinezakken bij patiënten die behandeld worden met cytostatica.
- Deze voor de patiënt risicovolle, en voor de verpleegkundige niet-ergonomische wijze van het ledigen wordt ook toegepast bij patiënten die intensieve zorg behoeven. Deze patiënten hebben een verhoogd risico op infecties.

QRS komt met een innovatie op het gebied van het ledigen van urinezakken. Als specialist op het gebied van infectiepreventie en vloeistofmanagement introduceren wij de geheel nieuwe C3 Emptying Bag. Dit is een uniek hulpmiddel om hygiënisch, snel, efficiënt en kosteneffectief een urinezak (met kruiskraan) te ledigen en alle bovenstaande problematiek te verhelpen.

Productbeschrijving

Niet-steriele, 2 liter, disposable ledigingszak, met Flexi-Funnel™, connector, Cross-Hanger™ en terugslagklep. Verkrijgbaar met en zonder super absorberend polymeer, SAP by Curas™. Iedere zak is individueel verpakt in een CleanPak™, ten einde hygiënestandaard, gebruiksgemak en traceerbaarheid te vergroten tot het hoogste niveau.

Gebruik

De unieke C3 ledigingszakken zijn bedoeld om urine te draineren uit urinezakken en urinometers met een kruiskraan. Geschikt voor kortdurend gebruik.



Kenmerken & Eigenschappen

- Biedt een compleet gesloten systeem tijdens het ledigen van urinezakken en het afvoeren van de opgevangen urine.
- Super absorberend polymeer, SAP by Curas™ absorbeert vloeistoffen snel en converteert de vloeistof naar een niet-morsende gel (REF. 20460). Dit verzekert de veilige verwerking van urine.
- Voor de verwerking van urine van besmette patiënten of andere situaties waarbij de afgescheiden als potentieel gevaarlijk wordt beschouwd is de C3 zak met SAP by Curas™ uw eerste keus en de veiligste manier van urineverwerking.
- Heldere ml-aanduiding laat u de hoeveelheid opgevangen urine gemakkelijk aflezen.
- Meet al vanaf 25 ml, waar de meeste urinezakken pas van 100ml laten aflezen.
- Flexi-Funnel™ connector past op alle gangbare kruiskranen van urinezakken van alle merken.
- Cross-Hanger™ koord verzekert de bevestiging tussen C3 en de urinezak van de patiënt.
- Terugslagklep (NRV) voorkomt de reflux van urine, dit voorkomt opstijgende infectie.
- Spigot afsluitdop helpt u onbedoeld morsen tijdens transport te voorkomen (REF.20460)
- Geïntegreerde scheurlijn om de zak makkelijk open te kunnen scheuren. Meer gebruiksgemak dan de zak open te moeten knippen.
- Iedere zak is individueel verpakt in een CleanPak™ voor verhoogde hygiënestandaard en gebruiksgemak.
- Iedere CleanPak™ is voorzien van logistieke informatie zoals barcode. Dit verhoogt de mogelijkheid voor kostentoe wijzing en zorgt voor optimale traceerbaarheid van het product.
- WardPak™ verpakking: handige verpakking op afdelingsniveau. Een bundel van 25 CleanPak™ verpakkingen voor gebruik op afdelingsniveau.

Productspecificaties

Artikel	Omschrijving	Capaciteit	NRV	Flexi-Funnel™	Cross-Hanger™	Spigot
20460	Onsteriele C3 Ledingszak met SAP by Curas™	2 Liter	Ja	Ja	Ja	Ja
20461	Onsteriele C3 Ledingszak	2 Liter	Ja	Ja	Ja	Nee

QRS is uw partner op het gebied van vloeistofmanagement. Wij bieden u oplossingen voor het managen van vloeistoffen op iedere afdeling. Naast de C3 ledingszak denken wij graag met u mee over hoe u de vloeistoffen op iedere afdeling kunt managen. Voldoen aan de hoogste hygiënestandaarden, de hoogste traceerbaarheid en slimme oplossingen. Wij helpen u graag!

Bestelinformatie


Artikel	Omschrijving	CleanPak™	WardPak™	Besteleenheid
20460	Onsteriele C3 Ledingszak met SAP 2L	1 st/zak	25 st/zak	200 st/doos
20461	Onsteriele C3 Ledingszak zonder SAP 2L	1 st/zak	25 st/zak	300 st/doos

Product Symbols

Emptying Bag Symbols



SAP by Curas™ Symbols

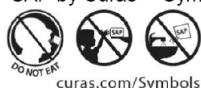

curas.com/Symbols

curas.com/Symbols