


AED

De AED-modus is uitsluitend bestemd voor patiënten die een hartstilstand hebben gehad en de volgende kenmerken vertonen:

- Reageert niet
- Ademt niet of niet normaal

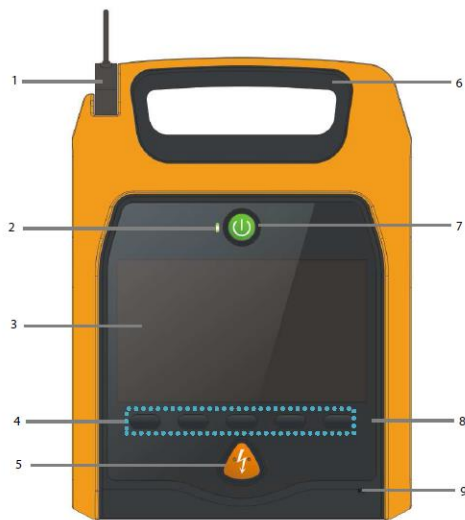

1. Padsconnector

Wordt gebruikt voor het aansluiten van de multifunctionele elektrodepads.

2. Statusindicator

Groen: alle tests zijn uitgevoerd en het apparaat functioneert naar behoren.

Rood: in het apparaat is een fout gedetecteerd.

3. Weergavescherm

4. Softkeys

De softkeys corresponderen met de labels erboven. De labels variëren, afhankelijk van de bedrijfsmodus.


5. Schok

Druk op deze knop om de patiënt een schok toe te dienen.

6. Handgreep

7. Aan/uit-schakelaar

Druk op deze knop om het apparaat in of uit te schakelen.

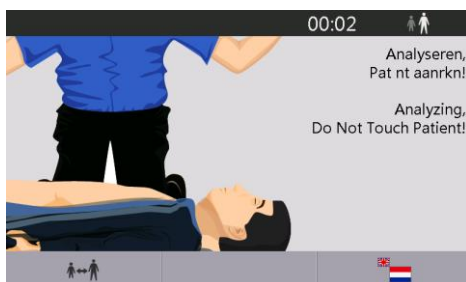

Weergave scherm

Grafische weergave van de gesproken instructies

Na gebruik:

- unit uitlezen via USB
- nieuwe multifunctionele elektrodepads aansluiten
- controle test uitvoeren

Druk op [**Gebr. test**] om een gebruikerstest uit te voeren volgens de instructies op het scherm

AED-procedure

Controleer of de patiënt niet reageert en niet of niet normaal ademt. Ga dan als volgt te werk:


1. Druk op de **aan/uit-schakelaar** om het apparaat in te schakelen.
Volg de gesproken en visuele berichten in het AED-informatiegebied

2. **Ontbloot de borstkas van de patiënt.**


Maak de borstkas van de patiënt goed droog en knip of scheer overmatige haargroei zo nodig af.

3. Breng **multifunctionele elektrodepads** aan op de patiënt

Volg daarbij de aanwijzingen op de verpakking.

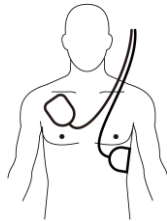

Volwassene (anterolateraal)

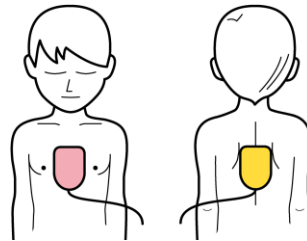

Kind (anteroposterieur)

4. **Volg de aanwijzingen op het scherm en de gesproken instructies.**

- *Als er een schokbaar hartritme wordt gedetecteerd, wordt het apparaat automatisch geladen.*
- *Als er geen schokbaar hartritme wordt gedetecteerd, wordt de melding "Gn schok geadv.!" Weergegeven*
 - *starten CPR*
 - *of herhalen ritme-analyse*
 -

5. Druk op de knop **Schok** wanneer daarom wordt gevraagd.

- *Verzekert u ervan dat niemand in aanraking is met de patiënt, het bed of apparatuur die op de patiënt is aangesloten.*
- *Roep luid en duidelijk "Iedereen los".*
- *Druk dan op de knop Schok op het voorpaneel om de patiënt een schok toe te dienen.*
 - *De toediening van de schok wordt bevestigd met het zowel gesproken als weergegeven bericht "Schok toegediend"*
 - *Op het scherm wordt het aantal schokken bijgehouden.*
 - *In geval er meer schokken moeten worden toegediend, krijgt u gesproken en geschreven aanwijzingen.*

6. **Uitschakelen:**

Aan/Uit knop indrukken, daarna de softkey: Uit