

Vacutex™

Wondverband met sterke capillaire werking.
Ontworpen voor patiënten.. op maat “geknipt” door professionals.



Medische
verbruiksmiddelen



Service en
onderhoud



Medische
apparatuur



Facilitair



Sportverzorging



Vacutex™

Vacutex™ is een wondverband met een sterke capillaire werking. Vacutex™ is te gebruiken bij moeilijk genezende wonden met matig tot veel vondvocht en gemiddeld tot veel debris.



Het werkingsmechanisme van een wondverband met capillaire werking:

Wondverbanden met een capillaire werking zijn vooral nuttig bij gemiddeld tot sterk exsuderende wonden, waarbij het debris dik en vettig kan zijn. Bij deze wonden is het belangrijk dat u overtollig vondvocht uit de wond verwijderd en dat tegelijkertijd de juiste vochtigheidsgraad voor het genezingsproces behouden blijft.

Wonden zijn vaak lastig te behandelen, omdat zij onregelmatige vormen hebben, zich bevinden op moeilijk te behandelen plekken op het lichaam, of diep en ondermijnd zijn. VACUTEX™ is een perfecte combinatie van een wondverband met zowel een sterke capillaire werking als ook de mogelijkheid tot drainage van de wond.

De capillaire werking componenten van VACUTEX™ zijn:

1. Absorberen:

Wondvocht wordt geabsorbeerd uit het wondbed door VACUTEX™. Voor diepe of ondermijnde wonden kan een VACUTEX™ drainagestrook of meerdere lagen VACUTEX™ wondverband gebruikt worden om het wondvocht uit de wond te absorberen. VACUTEX™ verwijdert wondvocht uit de wond door middel van een sterke capillaire werking.

Vacutex absorbeert alleen als de capillaire kanalen in contact komen met wondvocht.



2. Drainage:

Door middel van horizontale drainage wordt het geabsorbeerde wondvocht vanuit de eerste laag verspreid in de centrale (middelste) laag van het VACUTEX™ wondverband, waarbij de wondcontactlaag van VACUTEX™ op de wond niet plakkend en bijna droog blijft. Op deze manier zal het wondvocht de wondranden niet verweken.



3. Drainage en verwijdering:

Als de centrale (middelste) laag van het VACUTEX™ wondverband verzadigd raakt, wordt het overtollige wondvocht verplaatst naar de derde laag van het VACUTEX™ wondverband. Vanuit deze laag kan het wondvocht worden geabsorbeerd door een secundair wondverband.



Kenmerken

- Snelle absorptie van wondvocht.
- Sluit bacteriën samen met het wondvocht op, in de centrale laag van het verband.
- Door de capillaire werking levert het een bijdrage aan wond debridement en helpt het wond en peri-wondvocht te verwijderen.
- Bevordering van granulatieweefsel door de capillaire werking.
- Voorkomen van maceratie van de wondranden en de omliggende huid omdat laag 1 van het wondverband droog blijft.

Indicaties

- Huidzweren/ulcera (waaronder beenzweren, zweren t.g.v. druk en andere laesies met afscheiding)
- Diabetische ulcera (zweren)
- Abdominale wonden
- Geïnfecteerde wonden
- Oppervlakkige wonden
- Decubitus
- Snijwonden
- Donorplaatsen
- Tweedegraads brandwonden

De drainage component van VACUTEX™:

- A.** VACUTEX™ kan geknipt worden in drainage repen of kleinere, gestapelde stukjes afgestemd op de wondgrootte en geplaatst worden in de wond zonder dat VACUTEX™ vezels of stukjes wondverband achter zal laten.
- B.** Het wondvocht uit de wond wordt naar de centrale (middelste) laag van het VACUTEX™ wondverband gezogen.
- C.** Wondvocht wordt uit de wond gezogen en verticaal verplaatst naar het VACUTEX™ wondverband.
- D.** De VACUTEX™ wondverband laag die in contact staat met het wondbed blijft zo goed als droog, terwijl het wondvocht zich verticaal verplaatst (drainage) in de centrale (middelste) laag, waar het kan worden verzameld ("gemanaged") vanuit de wond.

3; Derde (buitenste) laag van het VACUTEX™ wondverband blijft droog totdat de centrale (middelste) laag van het VACUTEX™ verband verzadigd is.




2B; Wondvocht draineert zijdelings in de centrale laag van het VACUTEX™ wondverband totdat deze verzadigd is.

2A; Blokkeert en herverdeelt wondvocht in de centrale (middelste) VACUTEX™ laag.



1A; Sterke capillaire werking van VACUTEX™ zuigt interstitieel vocht uit het wondbed.

1B; De wondcontactlaag van VACUTEX™ vermijdt verspreiding van het wondvocht in de wond en gaat maceratie van de wondranden tegen.

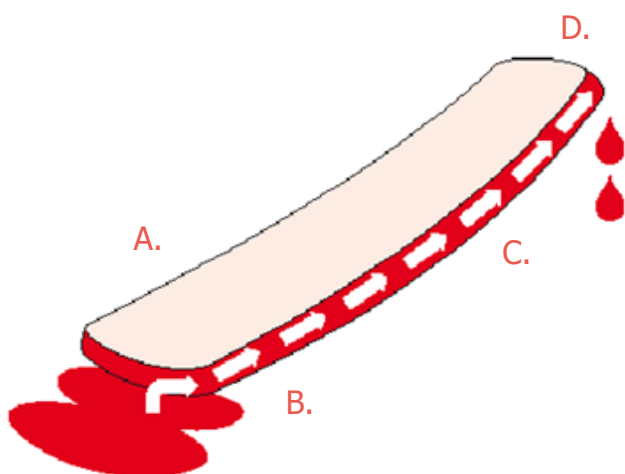

VACUTEX™

Geproduceerd door PROTEX Healthcare Ltd.

VACUTEX™ is verkrijgbaar in diverse afmetingen, geschikt voor de meeste wonden.

Z-Index	Artikelnummer	Omschrijving	Inhoud	Eenheid	Bestel-eenheid
16549864	VAC005005	wondverband met capillaire werking 5x5 cm	10 stuks	1 doos	1 doos
16549872	VAC010010	wondverband met capillaire werking 10x10 cm	10 stuks	1 doos	1 doos
16549880	VAC010015	wondverband met capillaire werking 10x15 cm	10 stuks	1 doos	1 doos
16549899	VAC010020	Wondverband met capillaire werking 10x20cm	10 stuks	1 doos	1 doos
16568958	VAC001040	Drainverband met capillaire werking 1x40cm	10 stuks	1 doos	1 doos



QRS is een groothandel in medische hulpmiddelen. De initiatiefnemers en de medewerkers van QRS hebben een medische achtergrond of zijn al jarenlang actief in de medische branche. Daardoor weten we wat er in gezondheidsinstellingen speelt en zijn we goed in staat om met onze klanten mee te denken. Onze klanten zijn werkzaam in ziekenhuizen, privéklinieken, ambulancediensten en overige zorginstellingen.

De 4 belangrijkste pijlers in onze werkwijze:

Innovatief

Continu zijn wij in binnen- en buitenland op zoek naar nieuwe innovatieve oplossingen die onze klanten in staat stellen om hun dienstverlening aan patiënten te verbeteren.

Compleet

Ons assortiment is zeer compleet en passen wij voortdurend aan op de wensen van onze klanten. Door de bundeling van krachten van onze 5 Medical Solutions bieden wij een zeer volledig pakket aan producten en diensten. Dat maakt ons een unieke speler in de markt.

Partners

In de samenwerking met de klant gaan we voor het meest optimale resultaat voor de klant. We geven advies, maken business cases en helpen klanten om hun doelen te bereiken. Het is niet voor niets dat we met veel klanten al langer dan 20 jaar een relatie hebben.

Ondernemend

In alles wat we doen zijn we op zoek naar win-win situaties, voor onze klanten en voor onze leveranciers. We brengen partijen bij elkaar en gaan samen op zoek naar oplossingen.



Randmeer 12
5347 JW Oss

www.qrs.nl
info@qrs.nl

Telefoon +31(0)412690461
Fax +31(0)412690462